

Afname van wangslimvlies

Het is aangewezen deze procedure niet uit te oefenen binnen 1 uur na een maaltijd of nadat u gedronken heeft. Er bestaat de mogelijkheid dat er dan onvoldoende wangslimvlies aanwezig is om een DNA-analyse uit te voeren.

Procedure:

1. Plaats een blanco blad papier op de tafel. Neem de meegeleverde plastic buisje (met blauwe dop) en controleer het nummer op de tube met het nummer op het document dat u moet ondertekenen. Wanneer er geen nummer werd toegewezen, schrijft u uw naam op het blanco etiket op het buisje.

Open de plastic tube en leg het buisje op het papier alsook de blauwe dop. Zorg ervoor dat de rand van het buisje niet wordt aangeraakt met de handen.




2. Open het verpakte borsteltje aan de zijde van het stompe uiteinde (achterkant).




3. Neem het borsteltje uit de verpakking met het stompe uiteinde (achterkant) en zorg ervoor dat het borsteltje (voorkant) niet in contact komt met de handen.



4. Plaats het borsteltje in de mond tegen de rechterwang en wrijf tegen de wang gedurende 30 sec. om het wangslimvlies op te nemen.

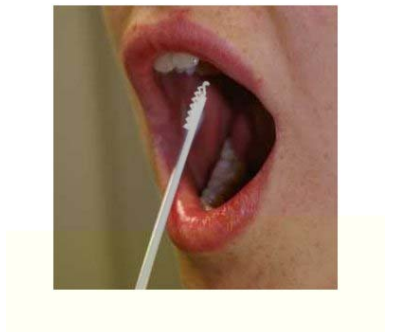

5. Plaats het borsteltje in het plastic buisje.

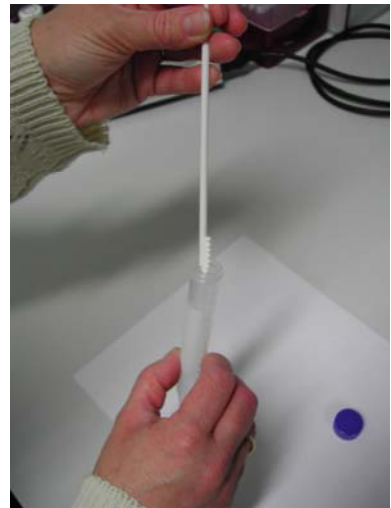

6. Werp het borsteltje af door op het stompe uiteinde te drukken.



7. Voer de procedure 2-6 opnieuw uit voor de linkerwang en sluit het buisje zorgvuldig met de blauwe dop.

